

Uputstvo za upotrebu

Sistem kompresivne limfne terapije
Model: POWER-Q8120



TERAPIJSKE INDIKACIJE

*HRONIČNI EDEMI
*POST-OPERATIVNE OPSTRUKCIJE LIMFNIH KANALA
*PREVENCIJA I TRETMAN VARIKOZITETA (PROŠIRENE VENE)
*SINDROM KARPALNOG TUNELA (PRE I POSLE OPERACIJE)
*REJNOLDSOV SINDROM
*NEUROPATIJA, NEURALGIJA
*ARTROZA, OSTEOPOROZA, GIHT
TENALGIJA - "TENISKI LAKAT", "SKAKAČKO KOLENO"
KONVALESCENCIJA (DISTORZIJA, UKLANJANJE FIKSACIJA)
POREMEĆAJ ISHRANE KOŽE
(DISEKCIJE LIMFNIH ČVOROVA)
ONKOLOGIJA (NAKON ABLACIJE, NODEKTOMIJE)

WELLNESS I ESTETIKA:

CELULIT – REDUKCIJA, APSORPCIJA MASTI
NEGA NAKON LIPOSUKCIJE
REGENERACIJA TKIVA – OPEKOTINE, OŽILJCI
DETOKSIKACIJA ORGANIZMA
SINDROM TEŠKIH NOGU
GOJAZNOST
POBOLJŠANJE ISHRANE KOŽE
OBLIKOVANJE TELA – RASTEGNUTA KOŽA
ANTI-AGING EFEKAT
PREVENCIJA PROŠIRENIH VENA
POSTLIPOSUKCIONA BRIGA
REGENERACIJA (POBOLJŠANJE METABOLIZMA MLEČNE KISELINE)

TEHNIČKI NAZIVI DELOVA Q 8120

Svrha, upotreba svakog dela

1. Svrha

Kompresivna limfna terapija je sistem terapije uz pomoć vazdušnog pritiska. Ponavljanjem ekspanzije manžetne pomaže cirkulaciji krvi i sprečava stvaranje krvnih ugrušaka ili začepljenja.

2. Pojedinačni nazivi svakog dela



Slika delova i objašnjenja sa stavke 4 , na 5-oj strani



Bandažer za noge



Bandažer za stomak



Bandažer za ruku



Bandažer dugačke pantalone



Panik taster



Blokator vazduha

Zaključak

Postoje 5 vrsti dodataka.

- Bandažer za noge (desna, leva), bandažer za stomak, bandažer za jednu ruku, dugačke pantalone.

Uz Preso aparat u kompletu idu 2 opcije

1.Q 8120 sa dugačkim pantalonama

2.Q 8120 sa bandažer za noge (desna, leva), bandažer za stomak i bandažerom za jednu ruku.

Sva dopunska poručivanja su na zahtev klijenta uz doplatu.

UPOTREBA APARATA JE NAMENJENA ISKLJUČIVO ZA AMBULANTE, POLIKLINIKE I BOLNICE KAO MEDICINSKO SREDSTVO NAKON ZAVRŠENE EDUKACIJE UZ POMOĆ TRENERA .

UPOZORENJE:

NEPRAVILNO KORIŠĆENJE APARATA Q 8120 MOŽE DOVESTI DO NEŽELJENIH EFEKATA !

**Ovo je za sigurnost korisnika i prevenciju od oštećenja imovine.
Molimo vas da ga pažljivo pročitate pre upotrebe proizvoda.**

	Proizvođač		Serijski broj
	Oprez		Datum priozvodnje
	Limit temperature		Uputstvo
	Zabranjeno guranje		Limit vlažnosti
	Pratite uputstva za upotrebu		Zabranjeno sedenje
	Opšti znak za zabranu		Održavati suvim
	Zabranjeno stajanje		To znači da ne razdvajate uređaj
	Tip BF aplikovan deo		Ovlašćeni predstavnik u evropskoj zajednici
	Ikopčajte kabl za napajanje		Opšti znak za upozorenje
	CE 0476		Opšti znak obavezne radnje
	Molimo vas da ne bacate nikakvu električnu opremu (uključujući crevo označeno ovim simbolom u kantu za smeće)		

Upozorenje - Ako se ne poštaju uputstva, korisnik može umreti ili prouzrokovati ozbiljnu štetu.

Pažnja - Ako se ne poštaju uputstva, korisnik može prouzrokovati povrede ili pretrpeti finansijski gubitak.

NAČIN KORIŠĆENJA

1. OBJAŠNJENJE



RBR	IME	OBJAŠNJENJE
1	MOD	Select a Mode. Ay , As, B - C1, C2, C3 - D1, Dz - E1, E2
2	INTERVAL	Nakon završetka svakog ciklusa, tj. Možete izabrati odmor između ciklusa. Izaberite ime (0 60 sekundi).
3	Vreme pritiska	Izaberite vreme pritiska (0 15 sekundi).
4	TIME	15 minuta je podešeno na fabrička podešavanja. Ako je potrebno da promenite vreme rada, prilagodite vreme za upotrebu između 0 i 99 minuta
5	PRESSURE	Vrednost pritiska je (1) 0 200 mm Hg : A1, A2, B, E1, E2 (2) 0 130 mm Hg : C1, C2, C3, D1, D2 - Vrednost pritiska se može podešiti u svakoj komori - Vrednost pritiska se podešava u 10 mm Hg
6	Start/stop	Ovo dugme će se koristiti za pokretanje ili zaustavljanje ove mašine.
7	MENU	Koristi se za aktiviranje uputstva za funkciju kao što je prikazano u prozoru i može prenesti svaku funkciju instrukciju.
8	MOVE	- Koristi se za obradu svake komore pri podešavanju svakog pritiska ili svakog vremena pritiska - Kada koristite dugme MOVE, broj svake komore - Prikazuje se u položaju „INTERVAL“
9	SET	Koristi se za podešavanje vrednosti svake funkcije.
10	SAVE	Koristi se za čuvanje vrednosti podešavanja kao što je prikazano u prozoru. Pritisnite a taster Save tokom 5 sekundi neprekidno.
11	RESET	Koristi se za inicijalizaciju vrednosti podešavanja. Pritisnite taster za resetovanje neprekidno tokom 5 sekundi

2 .OBJAŠNJENJE

1. 10 režim programa

Ovaj uređaj ima 10 vrsta programa režima kompresije

(A1, A2, B1, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2)

Korisnik može da izabere odgovarajući režim u skladu sa stanjem pacijenta.

2. Preskočni pritisak (0mm Hg)

Ako korisnik želi da preskoči bilo koji deo (komoru), podesite pritisak na 0 mm Hg, a zatim kompresija ne radi na komori za podešavanje od 0 mm Hg

3. Individualno podešavanje pritiska

Vrednost pritiska svake komore može se podesiti nezavisno od 0-200 mm Hg ili 0-130 mmHg u skladu sa režimom rada pacijenta.

4. Prekidač za slučaj nužde

Dok korisnik koristi ovaj uređaj u određenom režimu, ako se korisnik može osećati nelagodno ili ako korisnik mora hitno da zaustavi, korisnik samo pritisne prekidač za slučaj nužde na sigurno.

MODE 1. STAVITI SLIKE-TABELU SA NOGAMA NA NJOJ 7-2 STAVKA STRANA 10

Mode : A1



Mode : A2



Mode : B1



Mode : C1




Mode : C2



Mode : C3



Mode : D1

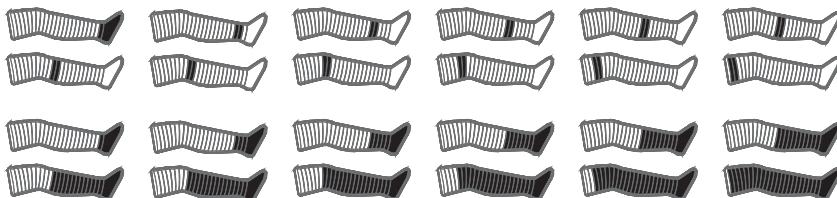

Mode : D2



Mode : E1



Mode : E2



Kako podešiti MODE

Kada je napajanje ovog uređaja UKLJUČENO, početni režim (A1) se automatski postavlja; Da biste postavili režim

I. Pritisnite taster Meni

II. Pomerite se na kurzor „Mode“ pomoću tastera Menu.

III. Pritisnite dugme SET (gore ili dole) da biste postavili izabrani „Režim“

IV. Ako korisnik pisma želi da postavi treptaj, to znači da je režim podešen uspešno.

V. Pomerite drugu funkciju pomoću dugmeta „Meni“ nakon podešavanja režima

Kako podešiti INTERVAL (0-60 sekundi)

I. Pritisnite taster Meni

II. Pomerite se na kurzor „interval“ pomoću dugmeta „Meni“.

III. Pritisnite taster SET (gore ili dole) da biste postavili izabrano „Vreme intervala“

IV. Ako pismo koje korisnik želi da postavi trepće, to znači da je intervalno vreme uspešno postavljeno.

V. Pomerite drugu funkciju pomoću tastera Menu nakon podešavanja intervala vremena.

Kako podešiti VREME PRITISKA (0-15 sekundi) od 12 komora odjednom

I. Pritisnite taster Meni

II. Pomerite se do kurzora „Vreme pritiska“ pomoću dugmeta „Meni“

III. Trenutno sve komore trepere istovremeno.

IV. Pritisnite taster SET (gore ili dole) da biste postavili izabrano „Vreme pritiska“.

V. Ako pismo koje korisnik želi da postavi trepće, to znači da je vreme pritiska uspešno postavljeno.

VI. Pomerite drugu funkciju pomoću dugmeta „Meni“ nakon podešavanja vremena pritiska.

Kako podešiti VREME PRITISKA (0-15 sekundi) svake komore

I. Pritisnite taster Meni.

II. Pomerite se na pokazivač „Vreme pritiska“ pomoću dugmeta „Meni“

III. Trenutno sve komore trepere istovremeno.

IV. Pritisnite dugme Pomeri (gore ili dole) i pomerite kurzor u odabranu komoru.

V. Broj svake komore prikazan je u „intervalu“

VI. Pritisnite dugme SET (gore ili dole) da biste postavili izabrano „Vreme pritiska“

VII. Ako pismo koje korisnik želi da postavi treperi, to znači da je vreme pritiska uspešno postavljeno.

VIII. Pomerite drugu funkciju pomoću dugmeta „Meni“ nakon podešavanja vremena pritiska.

Kako podešiti vreme (0-99 minuta)

I. Pritisnite taster Meni.

II. Pomerite se na pokazivač „Vreme“ pomoću dugmeta „Meni“.

III. Pritisnite taster SET (gore ili dole) da biste postavili izabrano „Radno vreme“

IV. Ako pismo koje korisnik želi da postavi trepće, to znači da je vreme rada uspešno postavljeno.

V. Pomerite drugu funkciju pomoću tastera Menu nakon podešavanja vremena rada

Kako se istovremeno podešava PRITISAK od 12 komora

I. Pritisnite taster Meni

II. Pomerite se na kurzor „Pritisak“ pomoću dugmeta „Meni“. Trenutno sve komore trepere istovremeno.

III. Pritisnite taster SET (gore ili dole) da biste postavili izabrani „Pritisak“.

IV. Ako pismo koje korisnik želi da postavi treperi, to znači da je pritisak uspešno podešen.

V. Pomerite drugu funkciju pomoću dugmeta „Meni“ nakon podešavanja pritiska.

* Ako korisnik želi da preskoči određenu komoru bez rada, prvo korisnik pređe u izabranoj komori i podesi pritisak 0 mmHg. Tada se komprimovani vazduh ne dovodi u odabranu komoru.

** Maksimalni pritisak u svakom režimu

1) 0-200 mmHg: A1, A2, B, E1, E2

2) 0-130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2

Kako se podešava PRITISAK svake komore

I. Pritisnite taster Meni

II. Pređite na „Kursor pritiska pomoću dugmeta Menu (Meni). Trenutno sve komore trepere istovremeno. Pritisnite dugme Pomeri (gore ili dole) i pomerite kurzor u odabranu komoru

III. Broj svake komore prikazan je u „Intervalu“

IV. Pritisnite dugme SET (gore ili dole) da biste postavili izabrani „Pritisak“

V. Ako pismo koje korisnik želi da postavi treperi, to znači da je tre pritisak podešeno uspešno.

VI. Pomerite drugu funkciju pomoću tastera Meni nakon podešavanja pritiska.

* Maksimalni pritisak u svakom režimu

1) 0-200 mmHg: A1, A2, B, E1, E2

2) 0-130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2

Kako resetovati

I. Pritisnite taster za resetovanje (dugme za pomeranje nadole) za 5 sekundi neprekidno

II. Režim „A1“ prikazan je u LCD prozoru.

III. Rešen

Kako SAČUVATI

I. Pre nego što korisnik koristi funkciju Save, podesite operativne vrednosti.

II. Nakon zaustavljanja treperenja kursora, funkcija Save se normalno koristi.

-Ako sačekate za 10 sekundi, treptanje kursora se zaustavlja

-Ako samo pritisnete dugme Menu za 3 sekunde, treptanje kursora se zaustavlja

-Pritisnite dugme Start za normalan rad i pritisnite dugme Stop, funkcija Spremi će biti spremna.

KONTRAINDIKACIJE :

OBRATITE SE LEKARU UKOLIKO IMATE PRATEĆE DIJAGNOZE I OBOLJENJA

- 1. Korišćenje medicinskih elektronskih uredjaja (pejsmejker i veštačko srce)**
- 2. Osoba koja ima plućni edem, srčane probleme , visoki krvni pritisak, visoku temperaturu i venski poremećaj**
- 3. Osoba koja ima kožne bolesti kao što su opekotine, otvorene rane sa gnojem teži oblik dermatitisa i maligne tumore**
- 4. Osoba koja je imala u skorije vreme hiruške operacije na koži**
- 5. Osobe za koje se sumlja da imaju prisustvo krvnih ugrušaka**
- 6. Osobe koje imaju fizičke deformitete**
- 7. Kod osoba koje su neposredno pre tretmana operisale vene .**
- 8. Kod osoba koje imaju probleme sa krvnim sudovima kao što je infart miokarda i angina p.**
- 9. Osobe koje su na oporavku posle operacija, trudnice i deca**

UPOZORENJE:

Koristite POJEDINAČNU utičnicu i ne priključujte nekoliko kablova odjednom. To može prouzrokovati požar, električni udar ili druge povrede.
Uređaj ne držite na preniskoj temperaturi zimi.
Može se stvrdnuti i oštetiti.
Ako želite da uređaj sačuvate duže vreme, stavite ga u njegovu kutiju.
Pazite da crevo za vazduh ne bude uvijeno ili savijeno.
Manžete ne perite u mašini niti ih potapajte u vodu.
Manžete se mogu nežno obrisati navlaženim peškirom ili krpom, ako je potrebno može se koristiti blagi deterdžent.

Povezivanje vazdušnog konektora na aparat



Povezivanje sa bandažerom



Blokator vazduha



Priprema pre upotrebe

1. Izaberite odgovarajuću manžetnu ili jastučić za upotrebu.
2. Spojite crevo na manžetnu ili jastučići umetnite vazdušni čep u izlaz za vazduh.
3. Nosite manžetnu ili jastučić da biste ih koristili ako su crevo i utikač pravilno povezani.
 - Upotrebite manžete za noge u položaju ispruzene noge.
 - Jastučić za struk se može koristiti preko trbuha i kuka; možete osetiti bol koji obavlja predeo grudnog koša pa zato podešite bandažer po vašem osećaju.
 - Postavite manžetnu za ruku i zlepite je pomoću fiksirane trake u deo ramena i grudi.
4. Spojite crevo (utikač) na glavno telo aparata .



Distributer i uvoznik Master Med

00 381 63 623 160

00 381 37 498 777

Zemlja porekla

Južna Koreja

Garancija 2 godine

www.mastermed.rs

